

Bedienungsanleitung



Therapiehilfe - Babywalker

KID(Z) & Co.®

Einleitung/Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für den Therapiehilfe „Babywalker“ entschieden. Damit haben Sie ein hochwertiges Kid(z) & Co. Produkt gewählt. Wir beglückwünschen Sie zu dieser Wahl und sind sicher, dass Ihnen das Hilfsmittel gute Dienste leisten wird. Jedes unserer Produkte wird nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt. Vor dem Versand erfolgt eine Endkontrolle.

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Produktes die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Empfang

Das Produkt wird komplett einsatzbereit geliefert, bitte überprüfen Sie die Ware nach Erhalt auf Fehlerfreiheit und achten Sie auf eventuelle Transportschäden.

Überprüfen Sie die Ware in Gegenwart Ihres Überbringers.

Sollten Transportschäden auftreten, veranlassen Sie bitte folgendes:

1. Bestandsaufnahme (Feststellung der Mängel) in Gegenwart des Überbringers (Spediteur, Transporteur)
2. Alle Forderungen aus dem jeweiligen Schaden werden mittels einer Abtretungserklärung an den Lieferanten weitergeleitet.
3. Rücksendung des Frachtbriefes, der Bestandsaufnahme und der Abtretungserklärung an den Lieferanten.

Nur bei Beachtung dieser Hinweise ist eine Anerkennung des Schadens durch uns möglich.

Sicherheitshinweis

Verwenden Sie den Babywalker nur auf ebenen Flächen.

Achten Sie darauf, dass der Rollwiderstand richtig eingestellt ist.

Bitte Achten Sie darauf, dass der Babywalker nicht in der Nähe von Hitzequellen aller Art genutzt wird.

Pflegehinweis

Zum Reinigen empfiehlt sich am Besten ein feuchtes Tuch. Zur intensiven Reinigung werden mittelscharfe Desinfektionsmittel empfohlen.

Bitte keine scharfen Putzmittel oder ähnliches verwenden.


Service und Montage und Einweisung

Nur durch autorisiertes und geschultes Fachpersonal.
(Medizinproduktberater des Sanitätsfachhandels).

Der Babywalker ist eine Lauflernhilfe für Kinder. Er unterstützt frühzeitig die Selbstständigkeit und fördert somit die eigene Mobilität. Der höhenverstellbare Schiebegriff und die Schleifbremse erlauben eine auf die Bedürfnisse angepasste Einstellung.



Auslieferung

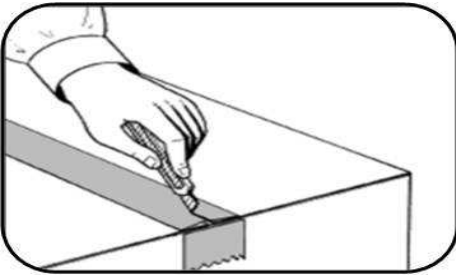

In der Regel erhalten Sie unsere Hilfsmittel in einem oder mehreren Kartons
Per Spedition.

Vergewissern Sie sich bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit der
Packstücke.


Öffnen Sie die Kartons mit einem Messer (siehe Bild oben).

Führen Sie das Verpackungsmaterial dem Recycling zu. Trennen Sie Pappe
von Kunststoffen.

Lassen Sie das Material nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche
Gefahrenquellen (Brand, Erstickung von Kindern und Tieren) sind.



Montage und Einstellungen:

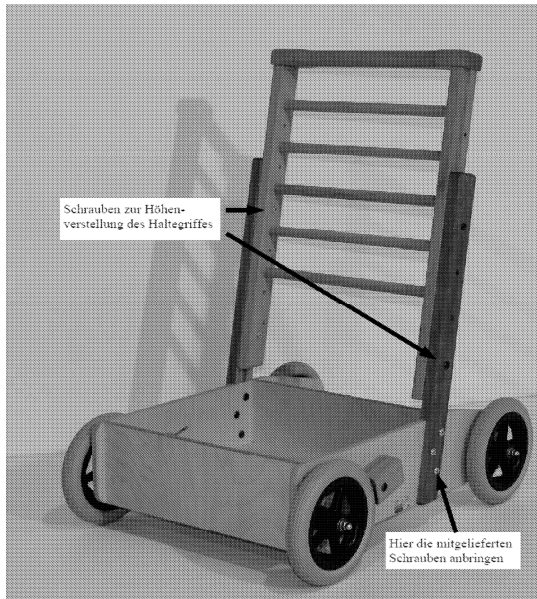

Der Babywalker wird in vormontierten Teilen geliefert. Sie brauchen bei der Endmontage nur den Haltegriff mit den mitgelieferten Schrauben am Untergestell montieren und das höhenverstellbare Element mit den ebenfalls mitgelieferten Schrauben anbringen.

Die Höhe des Griffes wird durch jeweils 2 Schrauben an beiden Seiten des Haltegriffes fixiert. Hierzu lösen Sie beide Schrauben und justieren Sie den Griff in der gewünschten Position. Danach befestigen Sie die Schrauben wieder in den passenden Löchern. Bitte achten Sie darauf, dass **alle** Schrauben fest sitzen, da sonst aufgrund der einseitigen Materialbelastung Verletzungsgefahr besteht.

Technische Daten:

Höhe:	84 cm
Breite:	54 cm
Länge:	70 cm
Fahrwerk:	4 Leichtlaufrollen mit Schleifbremse
Staufach:	große Ladefläche
Haltebügel:	höhenverstellbar
Oberfläche:	nach DIN 71-3 (Sicherheit für Spielzeug)



Kid(z) & Co.
Vertriebs GmbH & Co. KG
Am Königsweg 13
48599 Gronau
Tel.: 02565-40359-0
Fax: 02565-403599

www.kidz-co.de
info@kidz-co.de

Ausgabe 1 Jahrgang 2011