


## Bedienungsanleitung

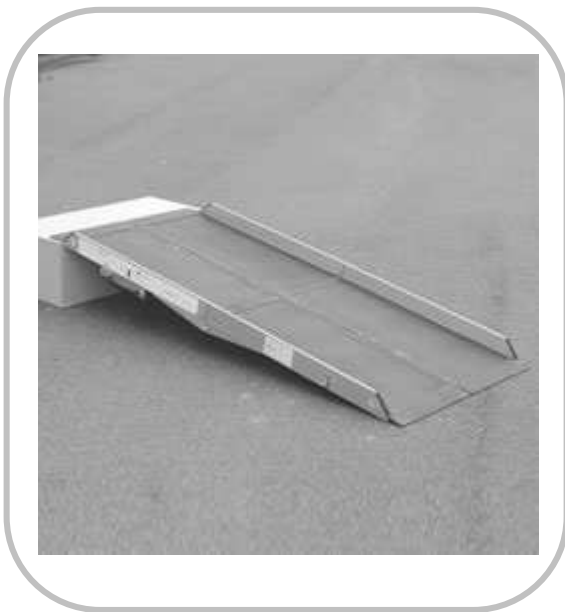

Alligator Rampe SF

KID(Z) & CO.®

## Einleitung/Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für die „Alligator Rampe SF“ entschieden.  
Damit haben Sie ein hochwertiges Kid(z) & Co. Produkt gewählt.  
Wir beglückwünschen Sie zu dieser Wahl und sind sicher, dass Ihnen das Hilfsmittel gute Dienste leisten wird.  
Jedes unserer Produkte wird nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt. Vor dem Versand erfolgt eine Endkontrolle.

**Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Produktes die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.**

### Empfang

Das Produkt wird komplett einsatzbereit geliefert, bitte überprüfen Sie die Ware nach Erhalt auf Fehlerfreiheit und achten Sie auf eventuelle Transportschäden.

**Überprüfen Sie die Ware in Gegenwart Ihres Überbringers.**  
Sollten Transportschäden auftreten, veranlassen Sie bitte folgendes:

1. Bestandsaufnahme (Feststellung der Mängel) in Gegenwart des Überbringers (Spediteur, Transporteur)
2. Alle Forderungen aus dem jeweiligen Schaden werden mittels einer Abtretungserklärung an den Lieferanten weitergeleitet.
3. Rücksendung des Frachtbriefes, der Bestandsaufnahme und der Abtretungserklärung an den Lieferanten.

Nur bei Beachtung dieser Hinweise ist eine Anerkennung des Schadens durch uns möglich.

## **Sicherheitshinweis**

-Benutzen Sie das Produkt nur wenn es sich in einem einwandfreien technischen Zustand befindet.

-Bitte nutzen Sie die Rampe nur für den vorgesehenen Einsatzbereich.

- Wenn die Rampe auseinandergefaltet wird, muss der Benutzer darauf achten, dass die Finger oder andere Körperteile nicht eingequetscht werden.


- Die Rampe darf nur auf stabilem Boden verwendet werden.

Die „Alligator Rampen SF“ sind eine mobile, transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Die Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen, bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse bei.

Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden.



## Auslieferung

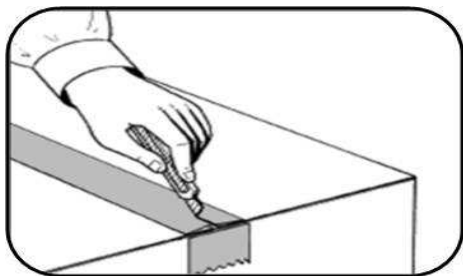

In der Regel erhalten Sie unsere Hilfsmittel in einem oder mehreren Kartons  
Per Spedition.

Vergewissern Sie sich bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit der  
Packstücke.

Öffnen Sie die Kartons mit einem Messer (siehe Bild oben).

Führen Sie das Verpackungsmaterial dem Recycling zu. Trennen Sie Pappe  
von Kunststoffen.

Lassen Sie das Material nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche  
Gefahrenquellen (Brand, Erstickung von Kindern und Tieren) sind.



## **Indikation:**

Die Rampen finden bei Patienten Anwendung, die auf Rollstühle angewiesen sind.

Sie sollen den Patienten die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe ermöglichen.

## **Einschränkung der Verwendung:**

Die SF-Rampen dürfen nicht mit mehr als 300 kg belastet werden.

## **Die Rampen dürfen maximal auf Steigungen von:**

**Modell SF-90 :**                      **20 cm**

**Modell SF-120:**                    **25 cm**


**Modell SF-150**                      **30cm**

**verwendet werden.**

## Beschreibung und technische Daten:

### Produktbeschreibung:

Die Alligator-Rampen, Typ SF bestehen aus Aluminium.

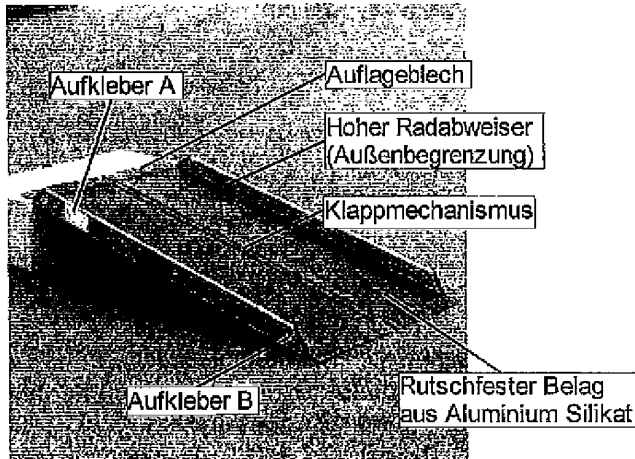

- Die SF-Rampen sind mit einem Aufkleber **A** und einem Aufkleber **B** gekennzeichnet (siehe Abbildung oben)
- Der Aufkleber **A** kennzeichnet die obere Seite der Rampen, d. h. die Seite, die auf dem Hindernis aufliegt.
- Der Aufkleber **B** kennzeichnet die untere Seite der Rampen, d. h. die Seite die auf dem Fußboden aufliegt.
- Die Auflagebleche der Rampe müssen stets auf einem stabilen und senkrechten Untergrund platziert werden.
- Prüfen Sie die Rampen vor jedem Befahren auf eine sichere stabile Lage.

## Technische Daten

<b>Alligator Rampe Typ</b>	<b>SF- 90</b>	<b>SF-120</b>	<b>SF-150</b>
Länge:	90 cm	120cm	150cm
Breite:	80 cm	80 cm	80 cm
Lauffläche:	76 cm	76 cm	76 cm
Höhe der Radabweiser:	6 cm	6 cm	6 cm
Max. Steigung/Höhenunterschied	12° 20 cm	12° 25 cm	12° 30 cm
Gesamtgewicht:	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
Max. Benutzergewicht(Traglast):	300 kg	300 kg	300 kg



## **Wartung und Pflege**

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

## **Entsorgung des Produktes**

Das Produkt darf nicht mit in dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

## **Notizen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Notizen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Kid(z) & Co.  
Vertriebs GmbH & Co. KG  
Am Königsweg 13  
48599 Gronau  
Tel.: 02565-40359-0  
Fax: 02565-403599

[www.kidz-co.de](http://www.kidz-co.de)  
[info@kidz-co.de](mailto:info@kidz-co.de)

Ausgabe 1 Jahrgang 2011